

GUIDE D'UTILISATION POUR LES SACS DASRI

Ces recommandations ne se substituent en aucun cas aux consignes mises en place au sein de l'établissement.

Recommandations préalables à l'utilisation

- Lire les inscriptions sur le sac
- Respecter les précautions d'emploi (ne pas utiliser d'objet piquant/coupant pour enlever la banderole de maintien du rouleau de sacs)
- Repérer le niveau de remplissage
- Veiller à utiliser ce sac avec un support adapté

Recommandations lors de l'utilisation

- Ce sac ne doit contenir que des déchets mous à risque infectieux.
- Le sac ne doit pas contenir :
 - o D'éléments piquants/coupants
 - o De liquide
- Ne pas dépasser la limite de remplissage
- Fermer le sac avec le dispositif prévu

Recommandation pour la mise aux déchets, après utilisation

- Ne pas rouvrir
- Ne pas placer les sacs DASRI dans d'autres contenants non soumis à la réglementation DASRI ou transport de matières dangereuses
- Disposer les sacs dans la zone de collecte dédiée